



Centro  
Diagnostico  
Veterinario

## COAGULAZIONE

L'appropriata raccolta, manipolazione e conservazione dei campioni di sangue per le prove di coagulazione sono fondamentali per ottenere risultati corretti.

- **USARE PROVETTE CONTENENTI CITRATO DI SODIO** (preferibilmente tamponato al 3,8% o al 3,2%) con 1 parte di anticoagulante e 9 parti di sangue. Eccesso di anticoagulante: aumento dei tempi di coagulazione. Riduzione dell'anticoagulante rispetto al plasma: accorciamento dei tempi di coagulazione.
- **CENTRIFUGARE IL CAMPIONE (4.500 RPM PER 5') PREFERIBILMENTE IMMEDIATAMENTE DOPO IL PRELIEVO (AL MAX ENTRO 1H)**, rimuovere il plasma ottenuto e conservarlo in una provetta di plastica (compreso il tappo). Sono da evitare cicli di congelamento/scongelo. Conservare a 1-4°C.